

Удобнее



Анализаторы имеют компактный дизайн, занимая на столе площадь, сравнимую с размером 17-дюймового ноутбука. Лизирующий реагент размещается внутри анализатора, что позволяет не занимать лишнее пространство в лаборатории. Большой сенсорный дисплей позволяет легко управлять анализатором и комфортно воспринимать отображаемую информацию.



Новые технологии позволили сократить количество рабочих реагентов и уменьшить их расход.

Производительнее

70 проб в час для BC-30s
40 проб в час для BC-20s



Объем пробы 9 мкл для цельной капиллярной крови идеально для педиатрических образцов.

BC-30s, BC-20s

Автоматические гематологические анализаторы

Технические характеристики

Методы:

Импедансный метод для определения WBC, RBC и PLT, бесцианидный метод определения гемоглобина

Рабочие характеристики:

Параметр	Диапазон линейности	Точность (CV,%)	Перенос
WBC (10 ⁹ /л)	0-200 (0-100 для BC-20S)	≤3,5% (4,0-6,9) ≤2,0% (7,0-15,0)	≤0,5%
RBC (10 ¹² /л)	0,00-8,00	≤1,5% (3,5-6,5)	≤0,5%
HbG (г/л)	0-280	≤1,5% (100-180)	≤0,5%
PLT (10 ⁹ /л)	0 - 4000 (0 - 1000 для BC-20S)	≤5,0% (100-149) ≤4,0% (150-500)	≤1,0%

Параметры

21 (19) параметр: WBC, Lymph#, Mid#, Gran#, Lymph%, Mid%, Gran%, RBC, HGB, HCT, MCH, MCV, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCC (BC-30s), P-LCR (BC-30s)
3 гистограммы: WBC, RBC, PLT

Реагенты

M-30D Diluent
M-30CFL LYSE
Probe Cleanser

Объем образца

Режим предразведения 20 мкл
Режим цельной крови 9 мкл

Производительность

BC-30s: 70 проб в час
BC-20s: 40 проб в час

Сенсорный дисплей

BC-30s: 10 дюймов
BC-20s: 8 дюймов

helicon

121374, г. Москва,
Кутузовский проспект, 88
mail@helicon.ru



8 800 770 71 21
www.helicon.ru

ФИЛИАЛЫ:

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СИБИРСКОМ РЕГИОНЕ:
630090 г. Новосибирск,
ул. Инженерная, д. 28
Тел.: +7 (383) 207-84-85
novosibirsk@helicon.ru

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ РЕГИОНЕ:
195220 г. Санкт-Петербург,
ул. Гжатская, д. 22, корп. 1
Тел.: +7 (812) 244-85-52
spb@helicon.ru

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В ПРИВОЛЖСКОМ РЕГИОНЕ:
420021 г. Казань,
ул. Татарстан, д. 14/59, оф. 201
Тел.: +7 (843) 202-33-37
volga@helicon.ru

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В ЮЖНОМ РЕГИОНЕ:
344116 г. Ростов-на-Дону,
ул. 2-ая Володарская, д. 76/23а
Тел.: +7 (863) 294-87-66
rostov@helicon.ru

Программное обеспечение на русском языке

Емкость памяти

До 500 000 результатов включая графики

Обмен данными

Поддержка протокола HL7
Двухнаправленное подключение к ЛИС

Интерфейсы

4 USB - порта (для внешнего принтера, сканера штрих-кодов, WiFi адаптера, клавиатуры и мыши),
LAN - порт

Принтер

Встроенный термопринтер
Внешний принтер - опционально

Габариты

≤ 410 мм (глубина) x ≤ 300 мм (ширина) x ≤ 400 мм (высота)

Вес

≤20 кг



BC-30s
BC-20s

Автоматические
гематологические анализаторы

Минимальный размер
Максимальные возможности

helicon



mindray
healthcare within reach

BC-20s, BC-30s

Автоматические гематологические анализаторы

Таким должен быть 3diff анализ


Mindray продолжает развитие решений для небольших лабораторий.

Компактные, технологичные BC-30s и BC-20s - это то какими и должны быть 3-Diff анализаторы.

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ СВОЙСТВА



Детальная информация о флагах WBC, RBC и PLT

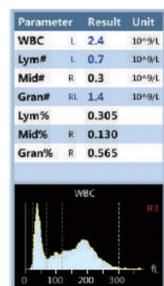


Лейкопения
Лимфоциты сниж.
Панцитопения

Пример 1:

Флаги «Лейкопения», «Лимфоциты снижены», «Панцитопения» означают низкое количество лейкоцитов, низкое количество лимфоцитов и уменьшение количества лейкоцитов, эритроцитов и тромбоцитов.

Пример 2:

Флаг «Анемия» и «HbG пат/интерференция» обозначают, что в пробе имеются признаки анемии, патологический уровень гемоглобина или на результаты повлияло большое количество лейкоцитов или агглютинация эритроцитов.

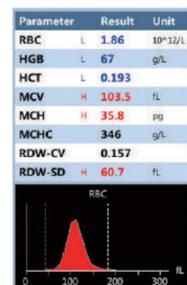

Анемия



Тромбоцитопения

Информация о различных флагах отображается совместно с результатами и гистограммами.

